

Rask, trygg og effektiv fjerning av all smitte

Med Decon-X intelligente desinfiseringsrobot fjernes effektivt selv de mest resistente mikrober, og også virus som er mer resistente enn Korona-virus.

MedikalTeknikk AS, Decon-X International AS og Letthus AS har i samarbeide utviklet og bygget en spesialtilpasset Desinfeksjonsvogn som forenkler og trygger desinfeksjonsprosessen samt er plass, tids, drift og kostnadsbesparende.

Konseptet gir fordeler som:

- Rask tilgang til å desinfisere alt ønskelig utstyr (Medisinsk og elektromedisinsk utstyr, tekniske hjelpemidler, senger, verne/smittevernutstyr etc.) der det er behov.
- Halverer forbruk av desinfeksjonsvæske og halverer desinfeksjonskostnadene.
- Leveres ferdig innredet og klar til bruk etter behov og ønske.
- Ingen behov for store bygningsforandringer og installasjoner.
- Utendørs plassering eliminerer faren for at personell utsettes for H₂O₂/Hydrogenperoksid tåken. (Kan plasseres innendørs med tilkoblet utlufting til friluft).
- Ingen tekniske løsninger som kan svikte og utsette personell for H₂O₂ da vognen etter desinfeksjon luftes ut manuelt ved å åpne begge dører noen minutter før man entrer vognen.
- Inspeksjonsvindu gir mulighet for å overvåke prosessen som også kan følges på PC og mobiltelefon. All prosess-dokumentasjon genereres i en rapport som automatisk sendes til bruker av roboten på sms/e-post.
- Enkel og praktisk inn/utlasting gjennom dør i front eller via bred dør bak og kjørerampe.
- Senker smitterisiko ved utendørs plassering som muliggjør desinfisering direkte etter transport og før utstyr tas inn på verksted og som det siste som gjøres før utlevering/transport.

Lett å bruke

1. Kjør vognen til ønsket plassering, tilkoble strøm og sett ned støtteben.
2. Decon-X robot er stasjonert i desinfeksjonsvognen, start roboten, og forlat vognen.
3. Slutt-rapport sendes automatisk til bruker når desinfiseringen er gjennomført.
4. Lukk opp dør i front og bak for rask utlufting og hent ut ferdig desinfisert utstyr.

Skånsom

Desinfisering med Decon-X er skånsom og skader ikke møbler eller teknisk utstyr

Tekniske data desinfeksjonsvogn:

Utvendige mål	4964 x 2460 x 3050 mm (LxBxH) (Drag i front kommer i tillegg)
Innvendige mål	4860 x 2360 x 2200 mm (LxBxH) (25m ³)
Dør i front	1000 x 1950 mm (BxH)
Dør bak	1350 x 1950 mm BxH)
Egenvekt	1.150 kg.
Kjørerampe for bakdør	2870 x 820 mm (LxB) (Tilleggsutstyr)

For mer informasjon, se:

<http://www.medikalteknikk.no/> og <https://www.deconx.com/>

Eller kontakt:

MedikalTeknikk AS	Trond Abelsen	+47 913 89 973
Decon-X International AS	Lars Fredrik Twinge	+47 994 97 322

trond@medikalteknikk.no
ltvinde@deconx.com